



## PROCEDURE pour le Prélèvement de sang sur FTA Card

*A l'intention des préleveurs (ses)*

A votre disposition : une enveloppe contenant une carte en papier 3M.

A l'intérieur de cette carte se trouve un cercle.

Attention : porter des gants ou utiliser des pinces stériles pour manipuler les cartes FTA

- Déposer au centre du cercle un échantillon sanguin **sans l'étaler**
  - Soit maximum 75 µl de sang prélevé sur EDTA
  - Soit plusieurs gouttes de sang de piqûres au doigt
- Porter le nom du patient et la date de naissance sur l'avant de la carte (lignes prévues à cet effet).
- **Laisser sécher le disque à température ambiante** (ne pas chauffer) pendant 1 heure.
- Replacer la carte dans l'enveloppe.
- Identifier l'enveloppe. Une seule enveloppe par patient.

**ne pas surcharger  
le support**

Envoyer l'enveloppe accompagnée de la demande d'examen fourni par le prescripteur à :

Laboratoire de Biologie - Service d'oncogénétique,  
Centre Paul STRAUSS  
3 rue de la Porte de l'Hôpital  
67065 STRASBOURG cedex