



PROCEDURE pour le Prélèvement de sang sur Tube PAXgene

Les tubes PAXgene sont utilisés pour le prélèvement de sang total en vue d'une conservation et extraction des transcrits (ARN)

Prélèvement :

Le tube est à mettre à température ambiante et à l'abri de la lumière avant d'être utilisé.

Le prélèvement s'effectue de la même manière que pour les tubes BD Vacutainer Safety Lock.

Prélever 2,5 ml de sang (volume minimum)

Immédiatement après, **retourner** le tube doucement, **minimum 10 fois**

Conserver le tube en position verticale au minimum 2H et au maximum 72h à température ambiante

Se conserve ensuite :

3 jours entre +18°C et +25°C

5 jours entre +2°C et +8°C

6 mois à -20°C ou -70°C